

OBJETIVO

O ágar CLED é utilizado para o isolamento, quantificação e identificação presuntiva de microrganismos em amostras de urina.

APRESENTAÇÕES

Código	Apresentação
4218.C001	Agar CLED 10 placas 90 x 15mm (21 ± 1ml).
4218.C006	Agar CLED 10 placas 90x15mm com 1 divisão (bipartidas - 11 ± 1 ml por divisão).
4218.C007	Agar CLED 10 placas 90x15mm com 2 divisões (tripartidas 7,5 ± 0,5ml por divisão).

COMPOSIÇÃO

Peptona, extrato de levedura, extrato de carne, L-cistina, lactose, azul de bromotimol e agar.

VALIDADE

122 dias a partir da data de fabricação desde que armazenados em temperatura adequada e mantida em sua embalagem íntegra.

ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em temperatura controlada de 2 a 8°C, assim o meio de cultura se manterá estável até a data de validade, desde que não haja contaminações de outras naturezas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor: Verde azulado a verde escuro;

Transparência: Ligeiramente opalescente;

Textura: Gelatinoso;

Homogeneidade: Homogêneo;

pH: 7,30 ± 0,20.

PROCEDIMENTO

- Aguardar até que o meio atinja a temperatura ambiente para realização do ensaio.
- Realizar ensaio conforme compêndios oficiais ou legislação vigente.

CONTROLE DE QUALIDADE

Após inoculadas com cepas padrões ATCC as placas devem ser incubadas à 35,0 ± 2,0 °C por 48 horas. Após período de incubação, realizar as leituras e os registros.

Cepa	Resultado Esperado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento bom Colônias amarelas
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Crescimento bom Colônias azuis

Certificados de análise disponível em:
www.biocendobrasil.com.br

DESCARTE

Após o uso, todo material deve ser descontaminado e descartado conforme legislação sanitária vigente.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Difco Manual, edition 2009.
2. KONEMAN, Elmer; et al. Diagnostic Microbiology. Lippincott, USA, 5 ed., 1997.
3. MAHON, Connie, Manuselis, George Jr. Diagnostic microbiology. Saunders. USA, 1995.
4. MURRAY, P. R. et al. Manual of clinical microbiology. 9th ed. Washington, DC: ASM Press, 2007.

GARANTIA

A BioCen do Brasil garante seus produtos, desde que utilizados de acordo com as instruções, mantidos em suas embalagens íntegras e armazenados dentro da temperatura exigida.

FABRICADO POR:

BIOCEN DO BRASIL LTDA.

Rua Pedro Stancato, 690 – Campo dos Amarais

CEP: 13082-050 – Campinas/SP

CNPJ: 03.594.155/0001-91

Resp. Técnico: Wellington Matta

Tel: (19) 3246-2581 / (19) 3246-1697